



Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Schnelldesinfektion von Oberflächen mit sehr breitem Wirkspektrum und kürzesten Einwirkzeiten. Frei von Aldehyden und QAVs!

Anwendungsbereiche:

Biguacid Liquid ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung, die vollständig frei von Aldehyden und quaternären Ammoniumverbindungen (QAV) ist! Das Präparat ist schon nach einer Einwirkzeit von nur **1 Minute** wirksam und zeichnet sich zusätzlich durch eine breite Wirksamkeit auch gegenüber Mykobakterien (inkl. Tuberkulose-Bakterien) aus.

Somit eignet sich Biguacid Liquid hervorragend zur gezielten Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen, medizinischen Oberflächen in allen wichtigen Funktionsbereichen wie OP, Intensivstation, Ambulanz, etc. Auch wird es in Arzt- und Zahnarztpraxen, sowie in Sekundärbereichen der Humanmedizin eingesetzt.

Biguacid Liquid kann weiterhin sehr gut in der **Lebensmittelindustrie** und lebensmittelverarbeitenden Bereichen, in Labor und Diagnostik, in Kindergärten, sowie in der Pharma- und Kosmetikindustrie zum Einsatz kommen.

Besondere Eigenschaften:

- für den Einsatz im Tuchspendersystem **A°-Wipes** und **Kimtech* Wettask* DS** geeignet
- sehr schnelle und breite Wirksamkeit
- wirksam gegen Noro- und Rotaviren
- schnelle Auftrocknung
- universell einsetzbar
- getestet für den Lebensmittelbereich
- frei von Aldehyden und QAV
- angenehmer Geruch

Anwendungsempfehlung:

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
VAH – Flächendesinfektion mit Mechanik DGHM-Standardmethoden		
VAH – Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid, tuberkulozid geringe und hohe organische Belastung	unverdünnt	5 min
ÖGHMP – Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid, tuberkulozid geringe und hohe organische Belastung	unverdünnt	1 min
tuberkulozid, mykobakterizid geringe und hohe organische Belastung	unverdünnt	1 min
DVG-Richtlinien – Lebensmittelbereich (Bereich A)		
bakterizid, levurozid wenig belasteter und belasteter Bereich; 10 °C / 20 °C	unverdünnt unverdünnt	30 min 60 min
EN 13697 – Flächendesinfektion ohne Mechanik in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen		
fungizid hohe organische Belastung	unverdünnt	1 min
DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	unverdünnt	1 min
Vacciniavirus	unverdünnt	1 min
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	unverdünnt	1 min
Coronavirus (SARS)	unverdünnt	30 s
EN 14476 – viruzide Wirkung		
MNV (murines Norovirus) ^a	unverdünnt	1 min
Rotavirus	unverdünnt	5 min

* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

^a murines Norovirus = Surrogatvirus für humanes Norovirus

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



Qualitätsmanagement
Medizinprodukte
Richtlinie 93/42/EWG



Qualitätsmanagement
ISO 9001



Qualitätsmanagement
EN ISO 13485

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Handelskai 265
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Anwendung:

Flächendesinfektion mit Mechanik; Scheuer-Wischdesinfektion:

Eine ausreichende Menge (Nass-Wischen) des unverdünnten, gebrauchsfertigen Produkts durch eine Scheuer-Wisch-Desinfektion auf die Oberfläche aufbringen und mechanisch verteilen. Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

Starke Verunreinigungen durch z. B. Blut, Erbrochenes, o.ä. sind vor der Desinfektion mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einwegtuch aufzunehmen und sachgerecht zu entsorgen.

Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich gemäß DVG-Richtlinien:

Das unverdünnte, gebrauchsfertige Produkt auf die gereinigte, trockene Oberfläche aufbringen und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

Lebensmittelberührende Oberflächen sind nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser von mindestens Trinkwasserqualität nachzuspülen. Vor Arbeitsbeginn müssen die Flächen gut abgetrocknet sein.

Zur Verwendung in Kombination mit den Tuchspendersystemen beachten Sie bitte die Hinweise auf den jeweiligen Produktinformationsblättern sowie die VAH-Empfehlungen zum sachgerechten Gebrauch und zur Aufbereitung von Tuchspendersystemen.

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 g enthalten:

35,00 g Propan-2-ol

25,92 g Ethanol

0,054 g Polyhexanide

Listung:

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Liste
- DVG-Liste (Bereich A; Lebensmittel)

Wirkungsspektrum:

- bakterizid, levurozid
- tuberkulozid
- mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid*

Besondere Hinweise:

- Alkoholische Desinfektionsmittel sollten nicht zur Desinfektion großer Flächen angewandt werden (Brand- und Explosionsgefahr!). Ausbringung: max. 50 ml/m².
- Von Zündquellen fernhalten; nicht rauchen. Heiße Flächen vor der Desinfektion abkühlen lassen. Elektrische Geräte ausschalten und auf einen spannungsfreien Zustand achten.
- Auf ausreichende Belüftung achten.
- Zur Desinfektion alkoholempfindlicher Flächen (z. B. Acrylglas, alkohollösliche Lacke) nicht geeignet.
- Kontakt mit Augen und Schleimhaut vermeiden.
- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen (gem. BGW).
- Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung beachten.
- Bei einem Ersteinsatz oder Präparatewechsel sind die Oberflächen, Eimer und Wischutensilien gründlich zu reinigen und zu spülen.
- Nicht mit anderen Präparaten mischen (z.B. starke Basen, Oxidationsmittel).
- Bitte beachten Sie die RKI-Empfehlung „Anforderungen bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ (BuGBI 47/2004) sowie die Empfehlung des VAH und IHO zur Flächendesinfektion!

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Geruch:	alkoholisch
pH-Wert:	ca. 6 bei 20 °C
Dichte:	ca. 0,88 g/cm ³ bei 20 °C
Flammpunkt:	21,5 °C gem. DIN 51755

Lieferformen:

- Karton mit 10 x 1 L Flaschen
- Karton mit 2 x 5 L Kanistern
- 1 x 10 L Kanister

zusätzlich lieferbar:

- diverse Applikationshilfen zum Aufschrauben auf Flaschen und Kanister

Pharmazentralnummern:

- 1 x 1 L: PZN 2766692
- 10 x 1 L: PZN 2851280

Das Präparat wird hergestellt in Übereinstimmung mit den internationalen Qualitätsmanagementsystemen ISO 9001 und EN ISO 13485.

Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Flächendesinfektionsmittel Medizinprodukte gem. MPG und RL 93/42/EWG

CE 0124

Biozid gem. Biozid-Verordnung BAuA Reg.-Nr.: N-21337; N-51619

© Antiseptica 2014-08-28 AT

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



Qualitätsmanagement
Medizinprodukte
Richtlinie 93/42/EWG



Qualitätsmanagement
ISO 9001



Qualitätsmanagement
EN ISO 13485

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Handelskai 265
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft