

# ANWENDUNG

## A°-WIPES



- 1.) Handschuhe anziehen
- 2.) Deckel öffnen und aus der Mitte der Rolle das 1. Tuch herausziehen
- 3.) Langsam 1 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung über die Rolle gießen
- 4.) Das 1. perforierte Tuch durch die rote Spenderöffnung im Deckel ziehen
- 5.) Den Eimer anschließend wieder verschließen
- 6.) Eimer mit mitgeliefertem Kennzeichnungsetikett versehen
- 7.) Nach jeder Tuchentnahme die rote Klappe am Deckel schließen

**ANTISEPTICA**



ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH  
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7  
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11  
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

QUALITÄTS-  
MANAGEMENT  
Wir sind zertifiziert  
nach  
ISO 9001:2015



QUALITÄTS-  
MANAGEMENT  
Wir sind zertifiziert  
nach  
ISO 14001:2015



QUALITÄTS-  
MANAGEMENT  
Wir sind zertifiziert  
nach  
ISO 45001:2018



ANTISEPTICA Austria GmbH

A-1020 Wien, Wehlstraße 150/Haussteinstraße, Top 61  
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66  
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

**Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft**